

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---



**Evo Santé**



**ПОДУШКА ДЛЯ СПИНЫ  
И ПОЯСНИЦЫ**

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

*Изделие используется для профилактических и лечебных целей. При использовании изделия в лечебных целях необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.*

1. Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время длительного сидения. Профилактика возникновения болей в нижней части спины при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника.
2. Профилактика развития остеохондроза в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника.
3. Комплексная терапия остеохондроза нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника.
4. Устранение мышечного дисбаланса в области поясницы в результате сколиоза.
5. Комплексная реабилитация после травм и заболеваний нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника.
6. Поддержка поясничного отдела позвоночника при длительном сидении.

## **ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ:**

1. Обеспечение физиологически выгодного положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время длительного сидения.
2. Правильная поддержка поясницы с обеспечением ровного (по вертикали) положения позвоночника.
3. Нормализация тонуса мышц нижней трети грудного отдела и поясницы.
4. Уменьшение объема движений в поясничном отделе позвоночника.

## **ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подушку размещают на кресле так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке кресла на подушке имеются два фиксирующих эластичных ремня.



- Служит для поддержания правильной осанки в положении сидя.
- Создает дополнительную боковую поддержку позвоночника.
- Универсальна в применении.
- Легко крепится к спинке любого сиденья.

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Съемный чехол, отдельный от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50°C. Изделие можно гладить при температуре 110°C.





## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.


Не оставляйте подушку на морозе!

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Благодаря своей анатомической форме поясничная подушка позволяет вам сидеть выпрямившись, не сутулиться. Изделие оказывает деликатную поддержку позвоночного столба и снижает напряжение в мышцах спины и шеи, подтягивает мышцы живота, уменьшает нагрузку на передние отделы позвонков. В результате быстрее проходят боли в спине, улучшается дыхание, нормализуется состояние пищеварительного тракта и мочеполовой системы.

**Боковая поддержка**

**Поддержка правильного изгиба позвоночника**

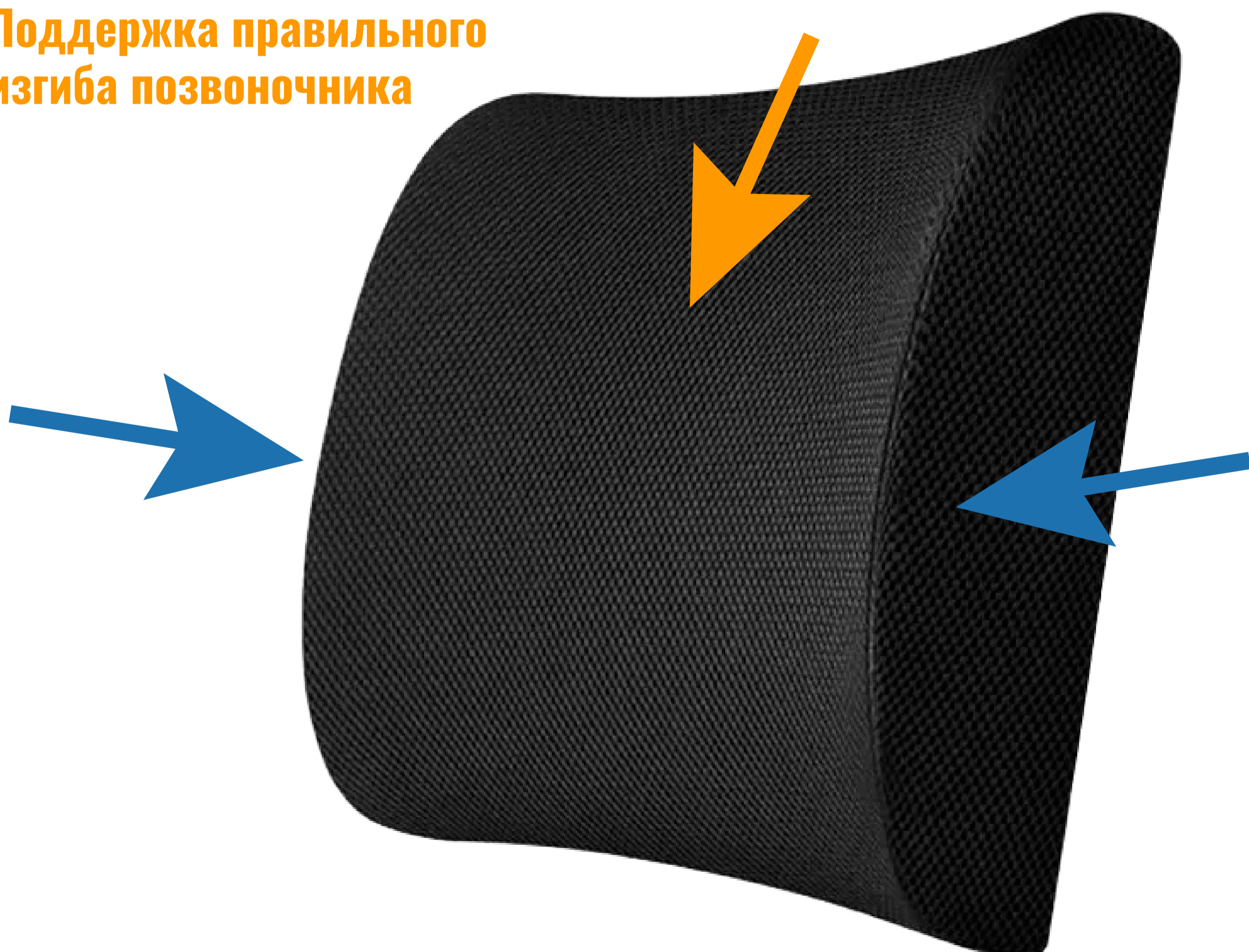

## **В АВТОМОБИЛЕ**

За рулем автомобиля очень важно принять удобное положение, чтобы спина в месте ее изгиба имела хорошую опору. Правильное положение позвоночника водителя обеспечивает специальное анатомическое сиденье. Однако большинство автомобилей оборудуются обычными сиденьями, после длительного сидения в которых возникает чувство усталости и скованности в спине.

Во время движения автомобиля наш позвоночник испытывает большие статические и различные вертикальные нагрузки из-за неровностей дорог, что является сильной нагрузкой на межпозвоночные диски, связочный аппарат и мышцы позвоночника. Поэтому если не предпринимать мер по защите нашего позвоночника от вредных нагрузок, то это рано или поздно может привести к развитию различных заболеваний позвоночника.

*Специально разработанная форма подушки позволяет сохранить правильную осанку в положении сидя и создает поддержку для позвоночника.*

## **ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ**

Каждому, у кого есть дети, хочется видеть их стройными и здоровыми. Развитие индустрии компьютерных игр, видео и телевидения приводят к еще большему снижению активности, детям приходится длительное время находиться в сидячем положении.

Подложите поясничную подушку между спиной вашего ребенка и спинкой стула за его письменным или компьютерным столом, и осанка вашего ребенка будет формироваться правильно. Вы убедитесь, насколько эффективно поясничная подушка уменьшает утомляемость, повышает внимание и способность усвоения учебного материала. Вашему ребенку будет легче учиться и поддерживать правильную осанку.



## НА РАБОТЕ И ДОМА

Если вы часто работаете в сидячем положении или проводите много времени дома за компьютером, то искривление позвоночника неизбежно.

Причина сутулости кроется не столько в нежелании сидеть прямо, сколько в несовершенстве мебели. Организовать свое рабочее место таким образом, чтобы снизить до минимума напряжение на спину, поможет поясничная подушка с эффектом пены Memory.

